

Service-Hinweise für Badewannenlifter Aquatec® Beluga / Aquatec® Kogia.

Für den Badewannenlifter Aquatec® Beluga / Aquatec® Kogia gelten die selben Service-Hinweise wie im **Servicehandbuch des Badewannenlifters Aquatec® Orca (1590348~A)** in Kapitel 1-3 auf den Seiten 14-16 unter Berücksichtigung der untenstehend aufgeführten Abweichungen. Die Hinweise zur Reparatur in Kapitel 4 beziehen sich nur auf den Badewannenlifter Aquatec® Orca.

2 Produktsicherheit

2.1.1 Visuelle Kontrolle

1. Sitz-, Rücken- und Grundplatte auf Beschädigungen und Vollständigkeit überprüfen.
2. Durch Aufziehen und Zusammenschieben die Hubscheren und Gleitschuhe (Beluga) bzw. Gleitflächen (Kogia) überprüfen.
3. Bolzen an den Lagern (Beluga) bzw. Lagerstellen (Kogia) von Sitzplatte/Hubschere und Grundplatte/Hubschere überprüfen.
4. Handbedienteil und Akku auf Beschädigung überprüfen. Handbedienteil und Akku austauschen, wenn das Gehäuse beschädigt ist oder Risse aufweist.

2.1.2 Funktionskontrolle

1. Steckerladegerät auf Leerlaufspannung von $14\pm 0,2V$ an den Ladepolen des Klinkensteckers mit Voltmeter überprüfen.
2. Badewannenlifter mit maximaler Belastung, durch Hochfahren und Absenken, auf Funktion und Störgeräusche überprüfen. Bei vollständig geladenem Akku können bei Nennlast 22 Badevorgänge ausgeführt werden. Bei älteren Akkus kann die Anzahl geringer sein.

2.1.3 Prüfung der elektrischen Sicherheit

! WICHTIG!
Regelmäßig elektrische Prüfung gemäß EN 62353 (VDE0751) nach Landesvorgabe erforderlich.

1. Ladegerät in Verbindung mit dem Akku auf Beschädigung an Gehäuse oder Kabel, Funktion und Ableitstrom prüfen.
2. Antrieb auf Beschädigung an Gehäuse oder Kabel prüfen.

3 Wiederaufbereitung

3.1 Reinigung und Desinfektion

Vorbereitung zur Reinigung

1. Akku abnehmen.
2. Rücken von der Sitzplatte lösen.
3. Elektronikanschlüsse mit Schutzkappen abdecken, um Wassereintritt zu verhindern.

Reinigen

1. Oberflächigen Schmutz entfernen.
2. Alle Komponenten des Badewannenlifters mit Ausnahme von Akku und Ladegerät mit Reiniger behandeln und mit klarem Wasser abspülen.
3. Bezüge erneuern oder mit maximal 60°C in der Waschmaschine reinigen.

! WICHTIG!
Beschädigungsgefahr
– Waschen bei höheren Temperaturen kann Einlaufen zur Folge haben.
– Bezüge nicht im Wäschetrockner trocknen.

4. Akku und Ladegerät mit einem Universalreiniger von Hand reinigen.
5. Alle Komponenten des Badewannenlifters mit Umluft trocknen oder mit Handtüchern trockenreiben.
6. Sauger und Saugerdeckel (Beluga) überprüfen und ggf. austauschen.